



Fonctionnalités de votre Cochlear™ Wireless TV Streamer (émetteur audio TV)

Cochlear™ Wireless TV Streamer (émetteur audio TV) transmet directement à votre processeur le son de votre téléviseur, installation stéréo, ordinateur personnel ou tout autre appareil similaire.

Remarque : L'émetteur audio TV peut être appairé avec plusieurs processeurs Baha pour une utilisation bilatérale, et permettre à plusieurs utilisateurs d'écouter le même émetteur.

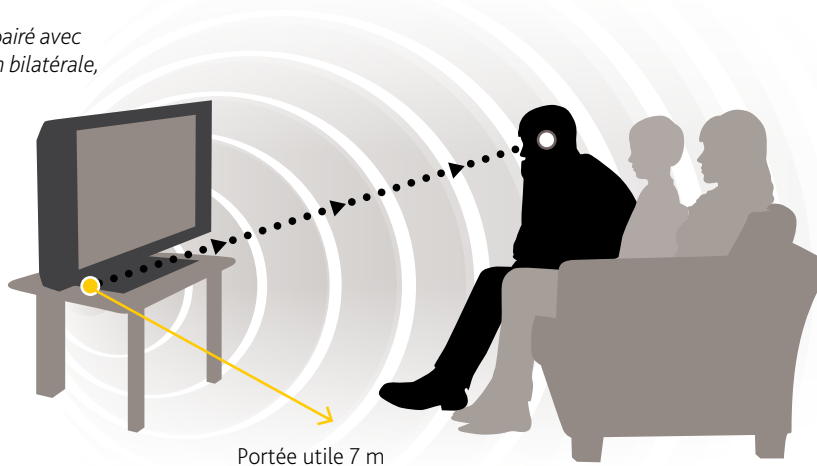

Présentation du produit

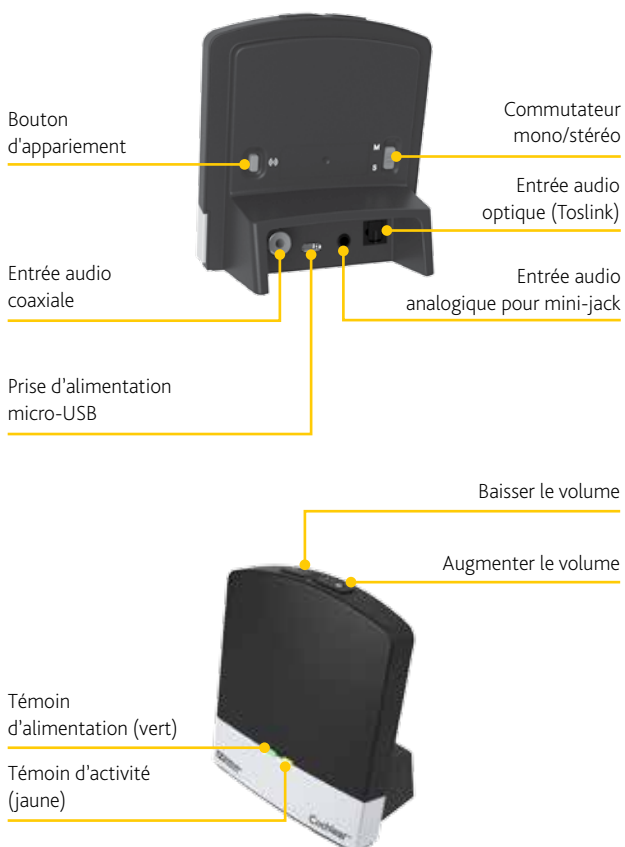

Premiers pas

Vérifiez avec votre audioprothésiste que votre processeur a été appairé avec votre émetteur audio TV. Les processeurs pré-appairés ne doivent pas être appairés à nouveau. Si votre processeur n'est pas pré-appairé, voyez ci-dessous les instructions vous permettant de l'appairer facilement avec votre émetteur audio TV.

L'émetteur audio TV prend en charge les entrées analogiques et numériques. En fonction de votre téléviseur, de votre installation hi-fi stéréo, de votre ordinateur ou de vos autres appareils audio, vous pouvez installer l'émetteur audio TV de différentes façons, comme indiqué dans les pages suivantes.


Éléments requis pour toutes les installations :

- A** Insérer le câble d'alimentation dans la prise micro-USB de l'émetteur audio TV.
- B** Insérer l'autre extrémité du câble d'alimentation dans une prise électrique murale. Raccorder l'émetteur audio TV à votre source audio selon l'une des 5 méthodes suivantes.

Configuration du Cochlear™ Wireless TV Streamer (émetteur audio TV)


Raccordement de l'émetteur audio TV à une source audio analogique (par exemple TV ou système hi-fi stéréo).

- A** Insérez le mini-jack stéréo du câble audio dans l'entrée pour mini-jack stéréo de l'émetteur audio TV.
- B** Branchez l'autre extrémité du câble dans les sorties « AUDIO OUT » de la source audio. Les sorties « AUDIO OUT » sont généralement marquées « L - R » (gauche et droite, respectivement) et se trouvent normalement à l'arrière de la source audio.

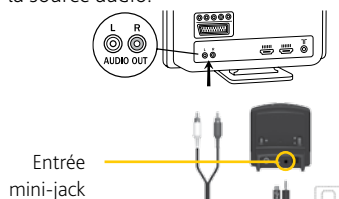



Raccordement de l'émetteur audio TV à une source audio analogique à l'aide d'un adaptateur mini-jack pour casque.

- A** Insérez le mini-jack stéréo du câble audio dans l'entrée pour mini-jack stéréo de l'émetteur audio TV.
- B** Raccordez l'adaptateur mini-jack stéréo aux fiches rouge et blanche de l'autre extrémité du câble audio.
- C** Insérez l'adaptateur mini-jack stéréo dans la borne de sortie « CASQUE » de la source audio.

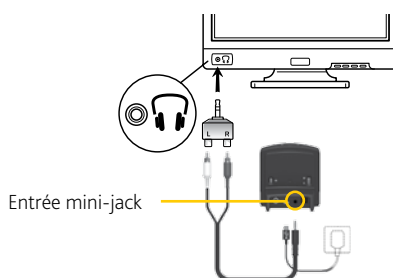


Raccordement de l'émetteur audio TV à une source audio analogique à l'aide d'un adaptateur Scart/Péritel.

- A** Insérez le mini-jack stéréo du câble audio dans l'entrée pour mini-jack stéréo de l'émetteur audio TV.
- B** Raccordez l'adaptateur Scart/Péritel aux fiches rouge et blanche de l'autre extrémité du câble audio.
- C** Insérez l'adaptateur Scart/Péritel dans la borne Scart/Péritel de la source audio.

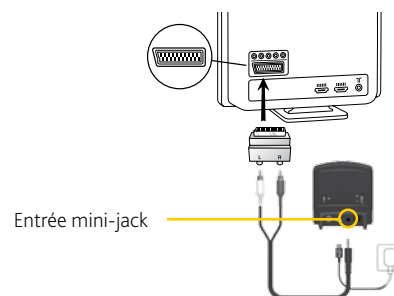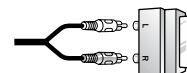


Raccordement de l'émetteur audio TV à une source audio numérique à l'aide de l'entrée audio optique (Toslink).

- A** Insérez l'une des fiches du câble audio optique dans la prise d'entrée audio optique de l'émetteur audio TV.
- Remarque :** La plupart des câbles optiques sont fournis avec un petit capuchon de protection placé sur la pointe de la fiche. Retirez ce capuchon de protection avant d'insérer le câble.
- B** Insérez l'autre extrémité du câble audio optique dans la prise « Digital Audio Out/ Optical » de votre source audio.

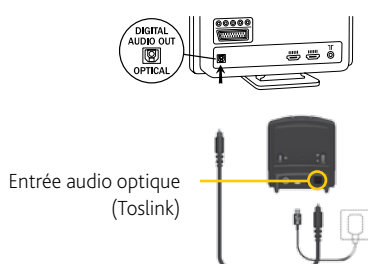

Raccordement de l'émetteur audio TV à une source audio numérique à l'aide de l'entrée audio coaxiale.

- A** Insérez l'une des fiches du câble audio coaxial dans la prise d'entrée audio coaxiale de l'émetteur audio TV.
- B** Insérez l'autre extrémité du câble audio coaxial dans la prise « Digital Audio Out/ Coaxial » de votre source audio.

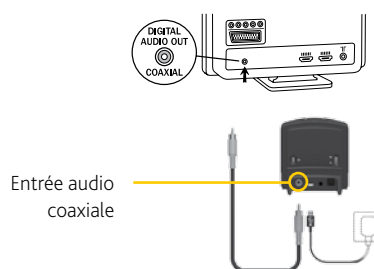

Appariement avec un processeur

- A** Vérifiez que l'émetteur audio TV est raccordé à une prise murale et que le témoin vert est allumé.



Témoin d'alimentation vert


- B** Éteignez votre processeur.

- C** Appuyez une fois sur le bouton d'appariement de l'émetteur audio TV pour en activer le mode d'appariement.



Bouton d'appariement

- D** Le témoin de canal clignote pour indiquer que le mode d'appariement a été activé. Le mode d'appariement sera actif pendant 20 secondes.

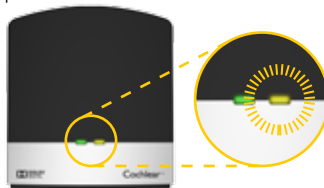

- E** Lorsque le témoin lumineux de canal clignote, allumez votre processeur.

Remarque : la réussite de l'appariement sera indiquée par une mélodie audible émise dans votre/vos processeur(s).

Maintenant, vous pouvez utiliser l'émetteur audio TV

Appariement de plusieurs émetteurs audio TV à un processeur

Il est possible d'appairer jusqu'à trois émetteurs audio TV à votre/vos processeur(s).

Pour appairer un deuxième ou un troisième émetteur audio TV, suivez les étapes **A** et **B** de la colonne de gauche.

- C** Appuyez ensuite sur le bouton d'appariement du deuxième émetteur audio TV **deux** ou **trois** fois.

- D** Le témoin lumineux jaune à l'avant de l'émetteur audio TV clignotera deux ou trois fois toutes les 2 secondes pour indiquer que l'émetteur est prêt à être appairé sur le canal 2 ou 3 du processeur.

Pressions sur le bouton d'appariement	Schéma de clignotement des LED				Canal
1	1	1	1	1	1
2	1 2	1 2	1 2	1 2	2
3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	3

- E** Terminez le processus d'appariement en allumant le ou les processeurs.

Utilisation du Cochlear™ Wireless TV Streamer (émetteur audio TV)

Démarrage de l'émission sans fil

Après l'installation, vous pouvez écouter sans fil l'audio transmis par l'émetteur audio TV en suivant ces simples étapes :

Pour commencer, allumez votre téléviseur, système audio ou ordinateur, puis appuyez sur le bouton de votre processeur et

maintenez-le enfoncé (pression prolongée). Si nécessaire, faites ceci séparément pour chaque processeur afin d'entendre la transmission audio dans les deux oreilles.

Arrêt de l'émission sans fil

Appuyez brièvement sur le bouton du processeur et relâchez-le.

Les dispositifs True Wireless™ sans fil Cochlear sont compatibles avec certains processeurs Cochlear. Consultez www.cochlear.com pour obtenir des informations complètes sur la compatibilité.

Tous les produits ne sont pas disponibles sur tous les marchés. La disponibilité des produits est soumise à l'approbation des autorités de réglementation des différents marchés.


Assistance

Pour plus d'informations sur le Cochlear™ Wireless TV Streamer (émetteur audio TV), reportez-vous au Manuel de l'utilisateur.

Pour plus d'informations sur le processeur Cochlear Baha, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur, partie A.

Cochlear Bone Anchored Solutions AB Konstruktionsvägen 14, 435 33 Mölnlycke, Sweden
Tel: +46 31 792 44 00 Fax: +46 31 792 46 95

www.cochlear.com

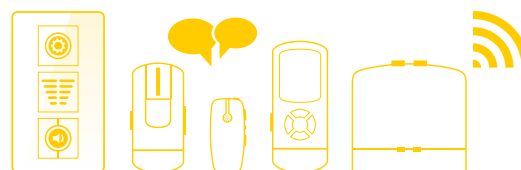

Consultez www.cochlear.com pour découvrir toute notre gamme d'appis et de dispositifs sans fil.