

# Guide de référence rapide pour les utilisateurs de processeurs Baha® Cochlear™ Wireless Phone Clip (kit mains libres)



## Fonctionnalités de votre Cochlear Wireless Phone Clip (kit mains libres)

- Profiter d'appels mains libres directement sur votre processeur Baha.
- Entendre votre système de navigation compatible Bluetooth® directement dans votre processeur Baha.
- Régler discrètement votre processeur Baha en utilisant le kit mains libres comme télécommande.
- Écouter sans fil de la musique provenant d'un appareil compatible Bluetooth®.

*Le kit mains libres se fixe facilement aux vêtements.  
Le microphone intégré capte et transmet votre voix, même si votre téléphone est éloigné de plusieurs mètres.*



## Présentation du produit



## Premiers pas

Vérifiez avec votre audioprothésiste que votre processeur a été appairé avec votre kit mains libres. Les processeurs pré-appairés ne doivent pas être appairés à nouveau. Si votre processeur n'est pas pré-appairé, voyez ci-dessous les instructions permettant de l'appairer facilement avec votre kit mains libres.

**Conseil** Assurez-vous que le volume de votre processeur est réglé à un niveau confortable avant de modifier les réglages à l'aide du réglage du volume du kit mains libres.

### Charge de la batterie

Insérez le câble de charge micro-USB fourni dans le kit mains libres et l'autre extrémité dans un ordinateur ou dans une prise de courant via l'adaptateur fourni.

Lorsque le témoin LED rouge sur le dessus du kit mains libres devient vert et émet un clignotement rouge toutes les 2 secondes, la charge est terminée.

La première fois que vous chargez votre kit mains libres, laissez-le en charge pendant au moins 3 heures, même si le témoin indique une pleine charge. Il n'y a pas de risque de surcharge de la batterie.

**Remarque :** Le kit mains libres assure 6 heures de conversation ou 80 heures d'autonomie en veille avec une charge pleine.

# Guide de référence rapide pour les utilisateurs de processeurs Baha® Cochlear™ Wireless Phone Clip (kit mains libres)



## Témoins lumineux (LED)

Le témoin LED situé sur le haut de votre kit mains libres est une interface multifonctionnelle qui fournit des informations sur l'état de l'appareil.

Clignotements	Signification
	Fonctionnement normal (vert)
	Batterie faible (jaune)
	En charge (rouge)
	Charge complète – toujours raccordé au chargeur (rouge/vert)
	Prêt pour appariement avec le processeur (jaune)
	Prêt pour appariement avec un dispositif Bluetooth (bleu)
	Appel Bluetooth en cours (bleu)

## Connexion à votre téléphone portable

Pour recevoir ou passer des appels téléphoniques à l'aide du kit mains libres, vous devez activer la fonction Bluetooth® sur votre téléphone portable. Votre téléphone peut vous demander de confirmer que vous souhaitez vous connecter au kit mains libres après qu'il a été correctement appairé.

Pour vous connecter manuellement, affichez la liste des « Périphériques appairés » dans le menu Bluetooth® de votre téléphone. Dans cette liste, sélectionnez « Hearing Aid Phone » (Aide auditive téléphonique) et choisissez « Connecter ».

Maintenant vous pouvez utiliser le kit mains libres.

Sur certains téléphones, vous pouvez également activer la « Reconnexion automatique ». Reportez-vous au manuel utilisateur de votre téléphone portable pour savoir comment procéder.



**Conseil** Dans la plupart des cas, un symbole « Casque » sur l'écran principal de votre téléphone portable confirme que la connexion est bien établie.

## Utilisation de votre Cochlear Wireless Phone Clip (kit mains libres)

### Gestion des appels avec le bouton répondre/raccrocher



- **Appels entrants :**  
Pour répondre à un appel, appuyez une fois.  
Pour refuser un appel, appuyez deux fois.
- **Pendant un appel :**  
Pour transférer au kit mains libres un appel commencé sur votre téléphone, appuyez une fois.  
Pour mettre un appel en attente, appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes.
- **Pour appeler :**  
Pour recomposer le dernier numéro, appuyez deux fois.  
Pour activer la numérotation vocale, appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes.

### Utilisation du kit mains libres comme télécommande



Lorsque vous n'êtes pas en communication téléphonique, le kit mains libres peut aussi servir de télécommande simple pour votre/ vos processeur(s).

- Régler le volume du processeur.
- Appuyer une fois pour désactiver et activer les microphones des processeurs.
- Appuyer une ou plusieurs fois pour passer d'un programme du processeur à un autre.

# Guide de référence rapide pour les utilisateurs de processeurs Baha® Cochlear™ Wireless Phone Clip (kit mains libres)



## Appariement avec un processeur

**A** Éteignez votre processeur Baha.

**B** Allumez votre kit mains libres et retirez le cache argenté.



**C** Appuyez une fois sur le bouton d'appariement blanc du kit mains libres à l'aide de la pointe d'un stylo ou d'un objet pointu.



**D** La LED clignote en jaune toutes les 2 secondes et le kit mains libres passe en mode d'appariement pendant 20 secondes.



**E** Pendant que le dispositif est en mode d'appariement, activez votre processeur :

**F** La réussite de l'appariement sera indiquée par une mélodie audible émise dans le processeur.

# Guide de référence rapide pour les utilisateurs de processeurs Baha® Cochlear™ Wireless Phone Clip (kit mains libres)



## Appariement avec votre téléphone portable

- A** Allumez votre kit mains libres et retirez le cache argenté.
- B** Assurez-vous que la fonction Bluetooth® de votre téléphone portable est activée. Reportez-vous au manuel utilisateur de votre téléphone portable ou consultez [www.jabra.com](http://www.jabra.com) pour savoir comment procéder.



- C** Appuyez une fois sur le bouton d'appariement Bluetooth® bleu du kit mains libres pour activer le mode d'appariement pendant 2 minutes. Pendant l'appariement, la LED devient bleue.



- D** Recherchez les dispositifs Bluetooth® sur le téléphone portable et sélectionnez « Hearing Aid Phone » (Aide auditive téléphonique) dans la liste.
- E** Si votre téléphone portable vous demande un code d'accès, entrez « 0000 » (quatre zéros).
- F** Votre kit mains libres est maintenant appairé avec votre téléphone portable. Si votre téléphone portable demande quel service Bluetooth® vous souhaitez activer, choisissez « Casque ».


Les dispositifs True Wireless™ sans fil Cochlear sont compatibles avec certains processeurs Cochlear. Consultez [www.cochlear.com](http://www.cochlear.com) pour obtenir des informations complètes sur la compatibilité.

Tous les produits ne sont pas disponibles sur tous les marchés. La disponibilité des produits est soumise à l'approbation des autorités de réglementation des différents marchés.


## Assistance

Pour plus d'informations sur le Cochlear Wireless Phone Clip (kit mains libres), reportez-vous au Manuel de l'utilisateur.

Pour plus d'informations sur le processeur Baha Cochlear, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur, partie A.

 Cochlear Bone Anchored Solutions AB Konstruktionsvägen 14, 435 33 Mölnlycke, Sweden  
Tel: +46 31 792 44 00 Fax: +46 31 792 46 95

[www.cochlear.com](http://www.cochlear.com)

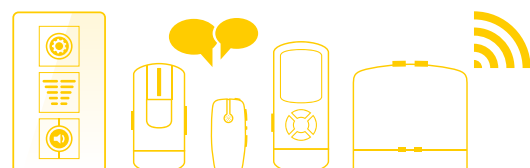

Consultez [www.cochlear.com](http://www.cochlear.com) pour découvrir toute notre gamme d'applis et de dispositifs sans fil.