

*L'Adaptateur Téléphone ConnectLine d'Oticon est une interface permettant la liaison entre un téléphone fixe traditionnel et un Streamer Pro ou un ConnectClip\* Oticon, et transforme alors les aides auditives Oticon en un casque sans fil idéal pour les communications téléphoniques.*

*L'Adaptateur Téléphone peut être utilisé sans fil et simultanément avec d'autres appareils appairés tels que des téléphones mobiles, une télévision, ou encore le Microphone ConnectLine.*

### **Système totalement intégré**

Avec le ConnectLine, c'est l'utilisateur qui contrôle le système, et non l'inverse. Des fonctions avancées, telles que AutoPriority et AutoConnect, permettent à l'utilisateur d'entendre un appel téléphonique et d'y répondre tout en regardant la télévision par exemple.

### **Téléphone fixe à la maison**

L'Adaptateur Téléphone version 2.0 est installé parallèlement à un téléphone fixe existant.

Lorsqu'un utilisateur se trouve dans la portée de l'Adaptateur Téléphone, le Streamer Pro ou le ConnectClip se connecte automatiquement et peut alors recevoir des appels (AutoConnect).

L'utilisateur peut facilement répondre à un appel. Il suffit d'appuyer sur un bouton du Streamer Pro, et ce, jusqu'à 30 mètres de distance de l'Adaptateur téléphone. Depuis le ConnectClip, répondez à l'appel en cliquant brièvement sur le bouton multifonctions.

### **AutoPriority**

Si un utilisateur écoute la télévision à l'aide de l'Adaptateur TV ConnectLine (ou d'autres sources audio), la fonction AutoPriority rend un appel entrant prioritaire sur l'autre source de son.

### **AutoResume**

Une fois l'appel terminé, le Streamer Pro ou le ConnectClip reprend automatiquement ce qu'il faisait précédemment. Par exemple, il remet le son de la télévision.


Pour davantage d'informations, visitez :  
[www.oticon.fr/telephone](http://www.oticon.fr/telephone)



\* Le Streamer Pro et le ConnectClip d'Oticon peuvent être appairés tous les deux avec l'Adaptateur Téléphone, mais ils ne peuvent pas fonctionner simultanément. C'est pourquoi il est recommandé d'en appairer un à la fois.

## Inclus

- Câble RJ11/RJ11 pour se connecter au téléphone fixe de la maison
- Alimentation électrique
- Mode d'emploi

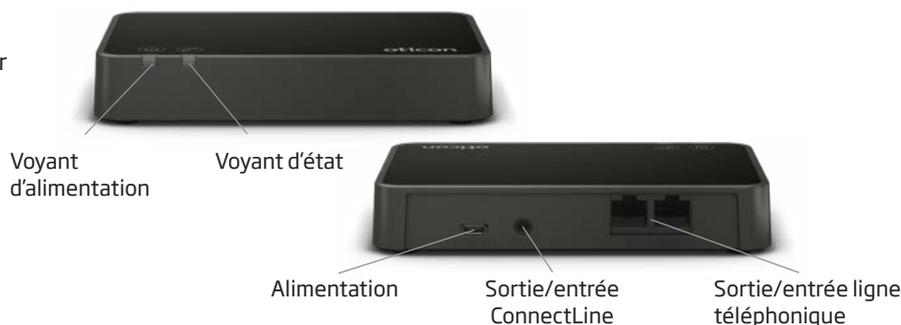

## Données techniques

Nom / Modèle	Adaptateur Téléphonique 2.0 ConnectLine, Modèle BS-H200
Compatibilité	Streamer Pro 1.4 et ultérieur, ConnectClip 1.1 et ultérieur
Dimensions	124 x 80 x 21 mm ; poids : 100 g.
Fonctions du système ConnectLine	AutoConnect : connexion automatique au Streamer Pro ou au ConnectClip lorsqu'il est à portée. AutoPriority : les appels entrants sont prioritaires par rapport au son de la télévision par exemple. Appairage à proximité : l'Adaptateur Téléphone sera automatiquement appairé au Streamer Pro ou au ConnectClip si ces derniers sont en mode appairage.
Portée	Jusqu'à 30 mètres avec le Streamer Pro ou le ConnectClip (portée sans obstacles)
Connexions	Sortie/entrée ligne téléphonique pour une interface vers le téléphone fixe (analogique) (PSTN) (RJ11/RJ11) Sortie/entrée ConnectLine pour une interface directe vers un ordinateur <sup>1</sup>
Consommation électrique	Max. 190 mA (en utilisant l'alimentation incluse)
Entrée écouteur	Max 6dBmV (efficace), 10 K $\Omega$
Sortie écouteur	-15 / -10dBmV (efficace), 10 -100 $\Omega$
Bande passante audio	Licence libre 2,4 GHz (bande ISM)
AutoConnect (portée)	Oui (30 mètres)
Qualité audio	Mono / 8 kHz échantillonnage
Fréquence	80 Hz - 3.5 kHz (sans fil)
Conditions de fonctionnement	10 - 40 °C
Conditions de stockage	-20 - 70 °C
Emissions	Max. 39 dB $\mu$ V/m @ 3 mètres en accord avec toutes les normes applicables

### Références :

1. Un câble d'interface pour ordinateur est livré avec le Streamer Pro et le ConnectClip. Existe également en accessoire.



Durée de disponibilité garantie des pièces détachées : 5 ans après la date d'achat.  
Décret 2014-1482 / Article L111-3 du code de la consommation.